

Medizinische Schutzhüllen

**FAIR
SQUARED**

Der Ultraschallsondenbezug (Schutzhülle) ist ein Medizinprodukt, welches als Schutzbarriere bei invasiven, diagnostischen Ultraschall Untersuchungen im medizinischen Bereich dient. Er hilft Kreuzkontaminationen der Ultraschallsonde bei endokavitären (d.h transvaginalen oder transrektalen) Ultraschalluntersuchungen zu vermeiden.

Die FAIR SQUARED Schutzhüllen werden aus fair gehandeltem Naturkautschuklatex hergestellt. Unsere Hersteller erhalten dafür eine Fair-Trade-Prämie, der ausschließlich für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Plantagenarbeiter und ihrer Familien verwendet wird. www.fairrubber.org




- FAIR SQUARED SCHUTZHÜLLEN SIND TRANSPARENT UND ZYLINDRISCH GEFORMT. DIE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE HILFT LUFTEINSCHLÜSSE ZU VERMEIDEN, DIE GGF. DAS BILDERGEBNIS STÖREN KÖNNTEN.
- FAIR SQUARED SCHUTZHÜLLEN HABEN EINE TROCKENE UND LEICHT GEPUDERTE OBERFLÄCHE, WAS EINEN ANGENEHMEN HAUTKONTAKT FÜR DEN PATIENTEN WÄHREND DEN UNTERSUCHUNGEN GEWÄHRLEISTET.
- FAIR SQUARED SCHUTZHÜLLEN SIND FLEXIBEL, LANGLEBIG UND HYGIENISCH. DURCH IHREN EINSATZ KANN DIE AUFWENDIGE REINIGUNG DER ULTRASCHALLSONDEN NACH JEDER UNTERSUCHUNG ENTFALLEN.
- SPRACHEN AUF DER VERPACKUNG: DE/EN/CZ

HINWEIS: Vor der Anwendung sollten Sie in der Ultraschalluntersuchung geschult werden. Bestimmungsgemäßer Benutzer: Es ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen, das in der Anwendung von Ultraschall geschult ist. Für die Verwendung der Schutzhülle sind keine besonderen Kenntnisse oder Fähigkeiten erforderlich. Dieses Produkt ist unter anderem geeignet für: Anästhesisten, Krankenpflegepersonal, Notfallmediziner, Endokrinologen, Interventionsradiologen und Interventionsradiologietechniker, Radiologen, Sonographen, Chirurgen, Chirurgietechniker und andere Kliniker. Schutzhüllen sind nicht wiederverwendbar. Die Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung kann das Risiko einer Kontamination des Geräts bergen und eine Infektion des Patienten oder eine Kreuzinfektion verursachen. Entsorgung der Einwegkomponenten als infektiöser Abfall.

KLINISCHER NUTZEN: Verhinderung der Kreuzkontamination von Sonden und damit Verringerung des Risikos von Kreuzinfektionen bei Patienten, die sich invasiven Ultraschalluntersuchungen und -diagnosen unterziehen (z. B. transvaginaler und transrektaler Scan).

ANWENDUNG: Verwenden Sie nur Gel auf Wasserbasis. Vermeiden Sie Ultraschallgel auf Erdöl- oder Mineralölbasis, durch die die Schutzhüllen beschädigt werden können. Die Desinfektion der Schallkopfsonde nach jeder Untersuchung kann die Wahrscheinlichkeit einer Kreuzkontamination verringern. Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden. Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

1. Vermeiden Sie eine Beschädigung der Schutzhülle durch scharfe Kanten, Fingernägel usw. 2. Platzieren Sie die Schutzhülle über dem Schallkopf. Ziehen Sie die Schutzhülle fest darüber, um Falten und Luftblasen zu entfernen, und achten Sie darauf, dass die Schutzhülle nicht durchstochen wird. 3. Überprüfen Sie die Schutzhülle auf Löcher und Risse.

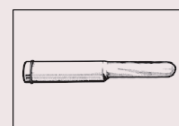

PRODUKTNAME	ART.-NR.	VE	EAN CODE
FAIR SQUARED 28MM SCHUTZHÜLLEN 200 STÜCK, LÄNGE 295MM	4799019	20	4260365856650
FAIR SQUARED 33MM SCHUTZHÜLLEN 200 STÜCK, LÄNGE 195MM	4799015	20	4260365856667

FAIR SQUARED GmbH
Hermann-Heinrich-Gossen-Straße 4
D-50858 Köln (Cologne), Germany
Telefon +49 (0) 2234 929 66 00
info@fairsquared.com
www.fairsquared.com

